

Inhalačný prístroj

PARI GmbH

Popis

Vysoký výkon a extra vybavenie robí z PARI BOY SX ideálnu voľbu liečby vážnych ochorení dýchacích ciest (napr. CHOPCH, cystická fibróza). Výkonný kompresor PARI BOY SX v kombinácii s nebulizérom PARI LC SPRINT zaisťuje krátku dobu inhalácie. Oba nastavce trysky (modrý i červený) predstavujú veľmi dôležitý rys zariadenia, pretože umožňujú užívateľovi priamu liečbu cielenú do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc. Červený nastavec vytvára tak jemné kvapôčky, že dosahujú periférne oblasti pľúc. Modrý nastavec môže poskytnúť optimálnu liečbu centrálného respiračného ústrojenstva.



Ďalšími funkciami zariadenia sú prerušovač LC a PIF-Control-System (špičkový inspiračný prietok). PIF-Control-System rozpozná, keď užívateľ dýcha veľmi rýchlo a pomáha mu naučiť sa správnej technike dýchania. Pomalé dýchanie je nevyhnutné pre efektívny transport liečiva cez krk hlboko do pľúc. Prerušovač LC slúži k výberu prerušovanej alebo kontinuálnej nebulizácie. Inhalačná liečba v intermitentnom móde zabráňuje plytvaniu liečiva. PARI BOY SX je vhodný pre pacientov od 4 rokov.

Určenie

Vhodný pre úspornú inhalačnú terapiu cielenú do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc podľa požiadaviek užívateľa (výberom určitého nastavca trysky). Ideálny inhalátor pre použitie v nemocniciach či na klinikách.

Nebulizér

Nebulizéry PARI LC SPRINT family sú vybavené rôznymi farebnými nastavcami trysiek, podľa tvorby rôznych veľkostí kvapôčok, ponúkajú riešenie prispôbené individuálnym potrebám užívateľov podľa indikácie a vekovej skupiny.

Nebulizér PARI LC SPRINT je zložený z malého množstva dielov, takže môže byť rýchlo a jednoducho zostavený alebo rozložený. Tiež to uľahčuje jeho čistenie. Vďaka jeho užívateľskej prívetivosti a vynikajúcemu výkonu je ideálnym prostriedkom pre príjemnú a efektívnu inhaláciu.

Výhody

- krátka doba inhalácie < 5 minút
- voliteľná prerušovaná nebulizácia
- optimálny dychový manéver vďaka PARI PIF-Control-System
- výkonný kompresor
- zobrazenie stavu naplnenia liečiva
- aplikácia liečiva do centrálnych alebo periférnych oblastí pľúc
- kód ŠUKL K74653



Nebulizér PARI LC SPRINT

Technické údaje

Kompresor

rozmery (v x š x d)	19,2 cm x 14,5 cm x 15 cm
hmotnosť	1,7 kg
tlak	1.6 bar
elektrické pripojenie	230 V~ / 50 Hz / 0,7 A / 80 W

Charakteristika aerosólu

Kompresor PARI BOY SX v kombinácii s nebulizérom PARI LC SPRINT (modrý nástavec trysky)

celkový výstupný výkon	600 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD)	3.5 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm	67 %

Charakteristika aerosólu

Kompresor PARI BOY SX v kombinácii s nebulizérom PARI LC SPRINT (červený nástavec trysky)

celkový výstupný výkon	450 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD)	2.2 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm	89 %

Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) vo 23 °C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium:
0,9% NaCl (5 ml) inspiračný prietok 20 l/min.

CE 0123



PARI JuniorBOY SX
vhodný pre deti od prvých mesiacov života



PARI TurboBOY SX
s náustkom a maskou pre deti i dospelých

Typy produktov

PARI BOY SX	085G3000
PARI JuniorBOY SX	085G3301
PARI TurboBOY SX	085G3201

Voliteľné príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

nebulizér PARI LC SPRINT	023G1000
PARI BOY SX ročné balenie	023G8511
prepojovacia hadička f/m	041B4591
filter set	041B4852
náustok	022E3050
maska pre deti	078G5000
maska pre dospelých	041G0730
prerušovač LC PLUS	022G1000



PARI BOY SX ročné balenie



prepojovacia hadička f/m

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

E: info@mr-diagnostic.cz
T: +420 245 005 648
W: www.mr-diagnostic.cz

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

E: info@mr-diagnostic.cz
T: +421 (0)2 20 633 367
W: www.mr-diagnostic.cz



www.pari-inhalatory.sk