



Prístroj pre nazálnu inhaláciu

PARI GmbH

## Popis

Pulzujúci aerosól pre presnú, účinnú a šetrnú liečbu sínusitídy. Prístroj distribuuje liečivú látku do vedľajších nosových dutín – presne tam, kde je potreba aby účinne liečila CRS. Nosné spreje sú schopné distribuovať liečivo do nosa, ale už nie sú schopné dosiahnuť vedľajšie nosné dutiny.

2 v 1- PARI SINUS môže byť použitý s nebulizérom LC SPRINT k liečbe dolných ciest dýchacích.



## Vhodný pre:

- pacientov s akútnou rinosinusitídou (ARS)-dospelý a deti od 6 rokov, napr. s bakteriálnou infekciou
- pacientov s chronickou rinosinusitídou (CRS) s polypmi /bez polypov-dospelý a deti od 6 rokov, pre ktorých doterajšia liečba kortikosteroidami padávajúcimi nosným sprejom nebola úspešná, alebo pacienti pred prvým alebo opakovaným chirurgickým zákrokom vedľajších nosových dutín (FESS)
- pacientov s CRS a ochorením dolných ciest dýchacích (sinobronchiálny syndróm), napr. CHOPCH, bronchitída, bronchiektázie, astma, cystická fibróza

## Nebulizér

Nebulizér PARI LC SPRINT SINUS je zložený z malého množstva dielov, takže môže byť rýchlo a jednoducho zostavený alebo rozložený. Tiež to uľahčuje jeho čistenie. Vďaka jeho užívateľskej prívetivosti a vynikajúcemu výkonu je ideálnym prostriedkom pre príjemnú a efektívnu inhaláciu.



Nebulizér PARI LC SPRINT SINUS

## Výhody

- šetrná terapia
- neinvazívny
- krátka doba inhalácie
- zvlhčenie nosnej sliznice
- možno použiť i k liečbe dolných ciest dýchacích (v kombinácii s nebulizérom LC SPRINT)

Prístroj je možné zamenou nebulizéru PARI LC SPRINT SINUS za PARI LC SPRINT použiť tiež k liečbe dolných ciest dýchacích. Nebulizér PARI LC SPRINT je možné vybaviť rozdielne farebnými nastavkami trysiek, podľa tvorby rôznych veľkostí kvapôčok, ktoré ponúkajú riešenie prispôsobené individuálnym potrebám užívateľov podľa indikácie a vekovej skupiny. PARI LC SPRINT nie je súčasťou balenia.



Nebulizér PARI LC SPRINT

## Technické údaje

### Kompresor

rozmery (v x š x d)	14,5 cm x 19,2 cm x 15 cm
hmotnosť	1,8 kg
elektrické pripojenie	240 V~ / 50/60 Hz

### Charakteristika aerosólu

celkový výstupný výkon	220 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD)	3.2 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm	71 %
min. objem náplne	2 ml
max. objem náplne	8 ml

Merané s prístrojom Malvern Spraytec ( spočítané podľa Fraunhofer- Mieovho modelu) vo 23 °C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium:  
0,9% NaCl (5 ml) tryskový prietok 4,6 l/min.

CE 0123



zátka do nosa PARI LC SINUS

## Typy produktov

PARI SINUS

028G1000

## Voliteľné príslušenstvo

(nie je súčasťou balenia)

nebulizér PARI LC SPRINT SINUS	023G2800
nebulizér PARI LC SPRINT	023G1000
aplikačný set PARI LC SPRINT SINUS	023G2840
ročné balenie PARI LC SPRINT SINUS	023G2860
hadičkový systém PARI SINUS	041B4570
zátka do nosa PARI LC SINUS (3 ks)	041B0576
nástavec do nosa PARI LC SINUS	041E0573
filter PARI BOY (5 ks)	041B4852



filter PARI BOY



hadičkový systém PARI SINUS



ročné balenie PARI LC SPRINT SINUS



aplikačný set PARI LC SPRINT SINUS


## MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21  
140 00 Praha 4  
Česká republika

E: [info@mr-diagnostic.cz](mailto:info@mr-diagnostic.cz)  
T: +420 245 005 648  
W: [www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)

Račianska 72  
831 02 Bratislava 3  
Slovenská republika

E: [info@mr-diagnostic.cz](mailto:info@mr-diagnostic.cz)  
T: +421 (0)2 20 633 367  
W: [www.mr-diagnostic.cz](http://www.mr-diagnostic.cz)

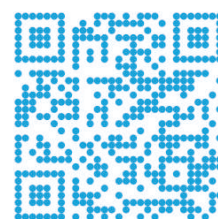

[www.pari-inhalatory.sk](http://www.pari-inhalatory.sk)

Spoločnosť MR Diagnostic s.r.o. si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny uvedených údajov.  
Vyobrazenie produktov je iba ilustratívne a môže sa meniť podľa požadovaných opcíí.